
がん遺伝子パネル検査病理組織検体情報

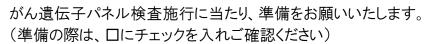



以下 ①②③のご準備及び ④記載後、本票もご提出下さい。					
□ ①パラフィン包埋ブロック ブロック提出が困難な場合は、次のページ参照	1	2	3		20
□未染標本スライド 5 µm 20 枚				•••	
(シランコーティングガラス使用) ・包埋ブロックは病変を代表する 1 ブロックでお願いします。 ・腫瘍検体サイズが 5mm×5mm以上、原則 3 年以内作製のブロックが対象です。 ・薄切順の通し番号をスライドガラスに記載し、1 ガラスに 1 切片のみ貼付して下さい。 (②でお願いする貴院の病理番号や患者名は不要です)					
□ ②上記ブロックより作製したHE染色標本 1 枚					
・未染標本供与の場合、未染標本 20 枚薄切後(21 枚目)に作成をお願します。 (腫瘍の残存量に使用します。) ・ブロック貸出の場合でもHE染色標本 1 枚をお願いします。 ・送付HE標本の返却はしませんので、貴院保管HEを送らないようにご注意願います。 ・貴院の病理番号をご記載ください。(下記③との照会に使用します。)					
□ ③貴院の病理診断書のコピー					
□ ④ご提出いただく病理組織検体の条件					
 ・検体採取部位: () ・固定に用いたホルマリン: □10%中性緩衝ホルマリン □その他() ・ホルマリン固定時間: □24時間以内 □24-48時間 □48時間以上(日間)□不明 ・検体採取法: □手術 □生検 ・検体採取日: 年 月 日 ・検体の脱灰: □なし □EDTA脱灰 □その他の脱灰() 					

※遺伝子解析に用いる未染標本作成(次ページ参照) に関して多くの注意点があります。 原則として、ブロックの提出をお願いいたします。

未染標本作製時の注意点

貴院にて未染標本を作製していただく場合には以下の点にご留意ください。

- ①マスク、手袋の着用(それぞれ、新たなディスポーザブル製品を使用)の上、薄切前に必ずミクロトームの 刃を交換し他検体の混入(コンタミネーション)がないようにご配慮ください。
- ②薄切水槽は十分洗浄してから使用し始めてください。ディスポの容器などを使用することもコンタミネーションを防ぐ方法となります。水槽の水は症例ごとに新しい水に交換してください。
- ③酸脱灰(KCX 等)した検体は検査できません。脱灰が必要な際は EDTA 脱灰期間が 5 日以内でお願いします。EDTA 脱灰でも検査不能の場合があります。
- 4標本作製費、送料等は、貴院にてご負担くださいますようお願いします。
- ⑤貸出されたブロックの返却はエキスパートパネル終了後になりますので、通常約2カ月で返却の手続きを 行います。
- ⑥検体の大きさによっては未染標本提出のご施設には追加標本作製をお願いする場合がございます。
- ⑦Foundation One CDx がんゲノムプロファイル検査用未染標本作製時は伸展せず、水切り後室温乾燥でお願いします。(HE 標本は伸展をお願いします。)
- ®Foundation One CDx がんゲノムプロファイル検査をご希望の際は未染標本作製前に確認したいことがございますので、下記病理診断部へお問合せをお願いいたします。

その他注意点

- ①検体については、日本病理学会の「ゲノム診療用病理組織検体取扱い規程」に準拠した取扱いをお願いいたします。
- ②お借りしたブロックは返却しますが、生検等の微小検体では組織を使い切ってしまう場合がございますのでご了承ください。

病理標本に関するお問い合わせ先

地方独立行政法人栃木県立がんセンター 病理診断部 がん遺伝子パネル検査病理担当者 問合せ可能日時:月~金(祝祭日除く)8:30~17:00 TEL:028-658-5151(代表)

病理組織検体送付先

〒320-0834 栃木県宇都宮市陽南 4-9-13

地方独立行政法人栃木県立がんセンター ゲノムセンター 「がんゲノム医療外来予約担当」宛

TEL 028-611-5480(直通) / 028-658-5151(代表)